



teamplay の変更点は何ですか?

最新の特長と機能を確認する

teamplay ご利用の皆様

現在、teamplay をご利用している医療施設¹は、約1,850 を超え、皆様には、日頃から格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、teamplay の最新バージョンをリリースすることとなりました。²本ソフトウェアは、より効率良く、皆様の装置管理に役立てて頂けるよう開発されたものです。

teamplay ユーザーの皆様には、登録されたアカウント情報に基づき、新しい特長や機能を自動的にご利用頂けます。本資料では、新しく変更された項目やメリット等、更新ポイントについて解

変更点 について

teamplay 全般:

- ログインおよび登録ページは、さらに使いやすくなり、新デザインに変更されます。



teamply Dose:

- ベンチマーク機能* が強化されされます。グローバルベンチマーキングにより、皆様の医療施設と世界の他の利用施設との線量比較をすることができます。サイドパネルでは、ご利用の基準値とベンチマーキング値とを比較する場合に、線量基準値を選択することができるようになります。「Ref. value (TP)」(参照値 (TR)) は、teamply の放射線量基準値で、既存のグローバル基準値の外挿が基本となっています。これは、お住まいの国で基準値が入手できない場合に、便利な基準値ガイドとなります。




- モダリティの情報も追加 されます。さらに詳しい調査に対応できるようになります。マンモグラフィ: フィルタ材料と厚さ (mm)、圧縮厚 さおよび圧縮力をフィルタリング します。核医学: 放射性医薬品、アイソトープ名および放射性医薬品 ISO コード
- Hitachi CT スキャナによるデータの自動マッピングおよび処理を全体的に改善すること で、ワークフローがより滑らかになり、画像スキャナ機器群のパフォーマンス全体を把握 できるようになります。

teampay Protocols^{3*}:

- 本機能により、MRプロトコルのHubにアクセスできます。MR スキャンProtocolを簡単に選択し、装置に対して配信できます。[MAGNETOM World Web](#) サイトでは、同様の機能およびトップエキスパートが公開した興味深い臨床症例をご確認いただけます。MAGNETOM のWorld Web サイトからスキャンプロトコルをMRプロトコルHubに直接ドラッグ・アンド・ドロップ、または、コピー＆ペーストし、そこから、このプロトコルをご利用中の接続されたすべてのSiemens Healthineers MRI 装置に簡単に配信することができます。



- CT プロトコル・エクスプローラーには、検索対象のプロトコルがより素早く見つかるように、さらに多くのフィルターが追加されています。例えば、スキャナモデル、またはプロトコルフォルダを選択します。

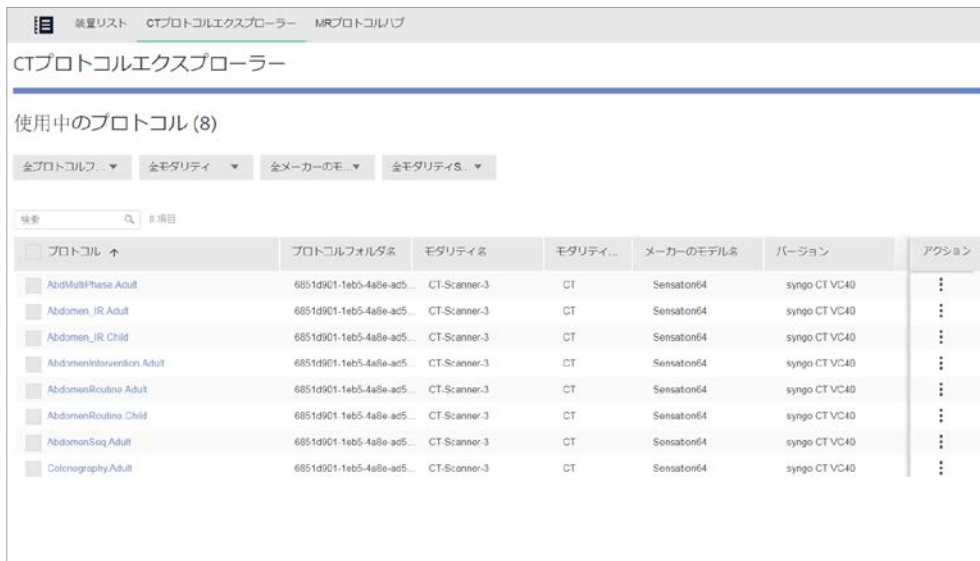

- 今後、弊社ではインタラクティブプロトコル管理への窓口となる teamplay Protocols BASIC* を提供予定です。この teamplay Protocols BASIC により、スキャンおよび再構成パラメータ付きのすべてのスキャンを含む、Siemens Healthineers CT スキャナのプロトコルツリーを表示することができます。プロトコルを修正すると、teamplay に追加された新しいバージョンと簡単に比較できます。分析ビューでは、1つの画面に重要な情報のすべてが表示できるように、該当する放射線値が追加されます。CTプロトコル・エクスプローラーには、お使いの装置装置群にある Siemens Healthineers 装置向けの CT スキャンプロトコル一式全部が表示されます。MAGNETOM の World Web サイトからのエキスパート MR スキャンプロトコルを取得し、お使いの装置群の Siemens Healthineers MR 装置に配信できるように、MRプロトコルHubが含まれています。

免責事項:

- ¹ 医療施設とは、teamplayに接続されたご利用者をいいます。
- ² teamplay サービス内容は、すべての国で利用できるわけではありません。サービスが、規制またはその他の理由により各国で提供されていない場合、本サービス内容の保証はできかねます。詳細は、お近くのシーメンスヘルスケアの担当者にお問い合わせください。
- ³ teamplay Protocolsは、選択された Siemens Healthineers スキャナーをサポートしません。詳細は、
- * 有料アプリケーション: ベンチマーク機能は、オプションであり、顧客利用施設の匿名性および保護を保证するため、登録加入者の最小数によって、ご利用頂けない場合があります。

Siemens Healthineers 本社
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
電話: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com