



teamplay 의새로운 기능

최신 기능을 찾아 보세요

teamplay 사용자님,


현재 1,850 곳이 넘는 병원¹에서 **teamplay**를 사용하고 있습니다. **teamplay** 사용자는 새로운 소프트웨어를 기대하셔도 좋습니다. 최신 버전은 **teamplay** 솔루션에 영상 제품군을 효율적으로 관리할 수 있도록 새로운 주요 기능을 넣고 강화하였습니다.²

teamplay 사용자는 새로운 특성과 기능에 접속할 수 있습니다. ³ 본문에서는 새로운 기능과 사용자가 얻는 혜택을 살펴볼 것입니다.

새로운 기능

전반적인 변화:

- 로그인 및 등록 페이지가 매력적인 디자인으로 바뀌었습니다.
- 미국이나 유럽연합 (키프로스, 몰타 및 슬로베니아 제외) 지역에서 이용하실 경우, 대시보드 페이지에서 Siemens Healthineers Store에 접속할 수 있는 타일을 볼 수 있으며 더 많은 애플리케이션을 찾을 수 있습니다⁴.

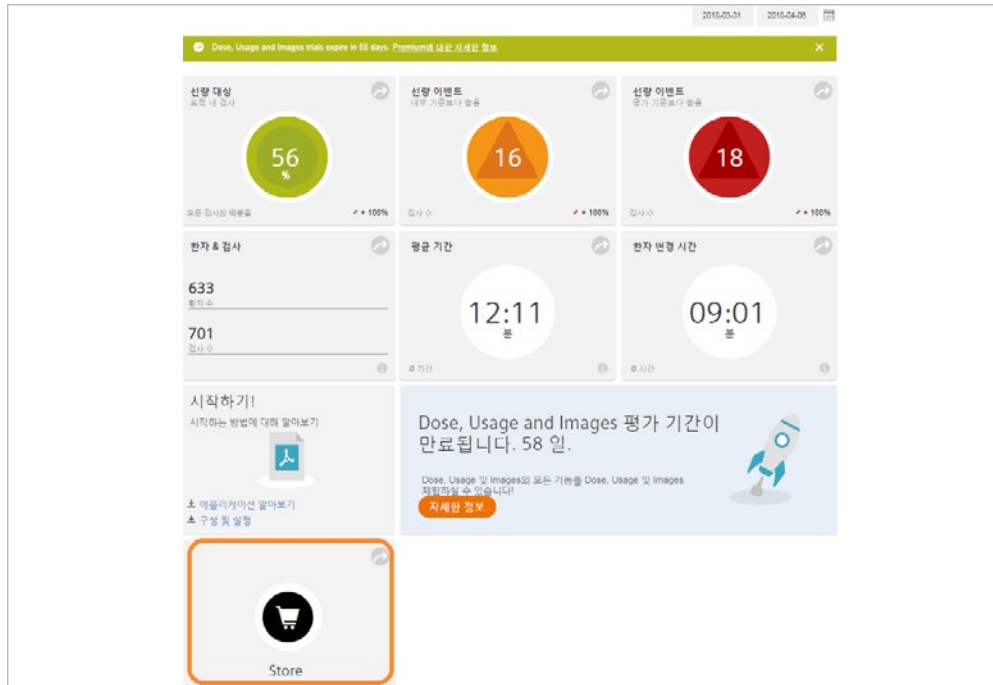

teampay Dose:

- 벤치마킹*이 보강되었습니다. 글로벌 벤치마킹을 사용하면 전세계 다른 병원들을 비교해 볼 수 있습니다. 사이드 패널에서 벤치마킹 값과 비교해 볼 수 있습니다. "Ref. Value (TP)"는 teampay 선량 기준 값이며, 이 값은 기존 글로벌 기준 값의 보간을 토대로 합니다. 사용자의 국가에서 기준 값을 제공하지 않는다면 이 값이 기준 값을 안내하는 가이드가 될 것입니다.



- teampay에는 다른 기법들을 통해 얻은 DICOM이 정교한 조사를 지원합니다. 유방조영술: 필터 자재, 필터 두께 (mm), 압축 두께 및 압축력. 핵의학: 방사성 의약품명, 동위 원소 이름 및 방사선 의약품 ISO 코
- Hitachi CT 스캐너를 통한 자동 매핑 및 처리 데이터의 개선은 영상 스캐너 제품군의 원활한 작업 흐름과 작업 수행 개요 제공에 도움을 줄 것입니다.

teampay Images/teampay Images Research⁵:

전자메일 주소로 수신자를 찾을 수 있습니다.

스터디 공유

제목 *
Head CT 변경

사람 *
Ivo

ivo. @siemens.com
teampay HQ (test institution) Erl...
Germany


2000 남은 문자 수:

공유 취소


영상 영상과 스터디를 제삼자와 공유하는 경우 해당 스터디의 전달 상태가 표시됩니다. 사용자는 영상을 보낸 제삼자 애플리케이션의 신원을 확인하고 상태를 점검할 수 있습니다.

teamply Protocols^{6*}:

- 사용자는 MR 프로토콜 허브에 접속할 수 있습니다. 이 기능을 통해 MR 스캔 프로토콜을 선택하고 배포할 수 있습니다. [MAGNETOM World](#) 웹사이트에서 게시된 임상 사례를 찾아볼 수 있습니다. MAGNETOM World 웹사이트에서 스캔 프로토콜을 MR 프로토콜 허브로 끌어오거나 복사하여 붙여 넣고, 이 허브에서 모든 제품군의 Siemens Healthineers MRI 스캐너들에 프로토콜을 배포할 수 있습니다.

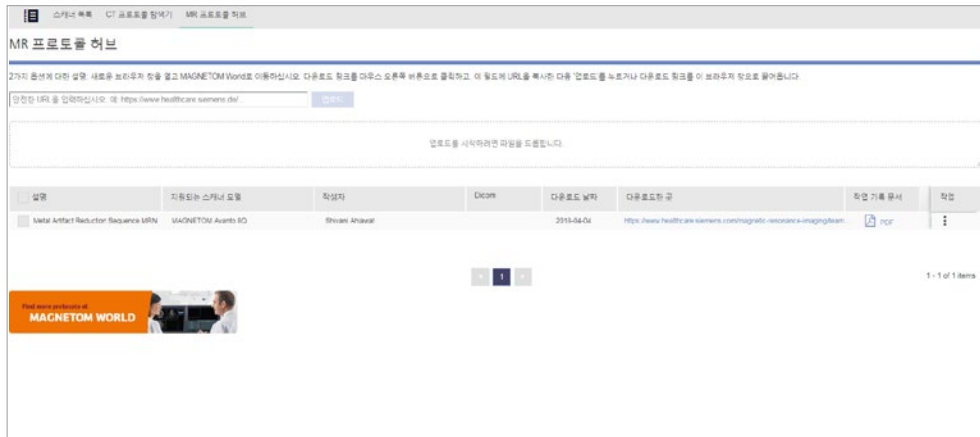

- 프로토콜을 빠르게 찾으실 수 있도록 CT 프로토콜 탐색기에 필터가 추가되었습니다. 스캐너 모델이나 프로토콜 폴더를 선택하시면 됩니다.

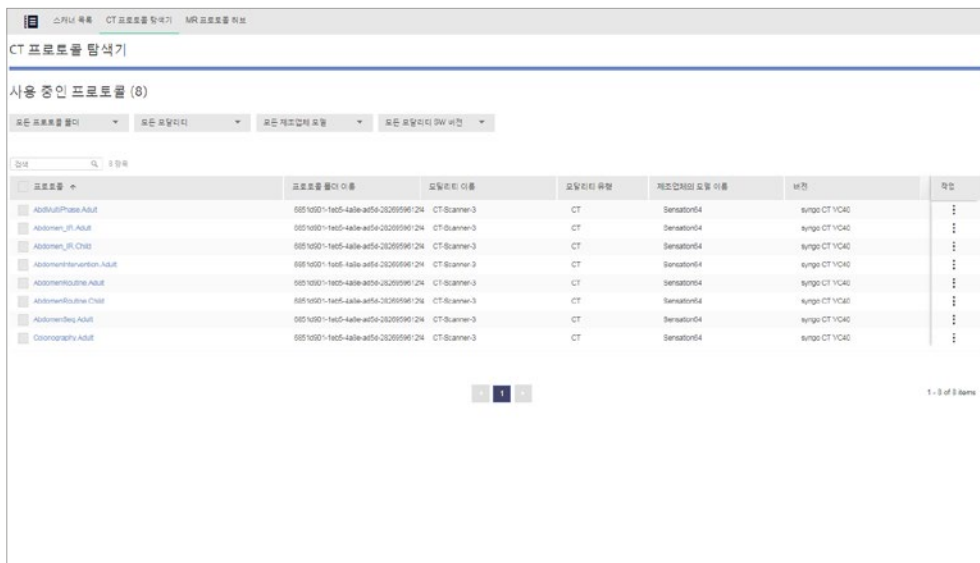

- 당사는 상호작용형 프로토콜 관리의 관문 역할을 할 **teamply Protocols BASIC***을 제공합니다. **teamply Protocols BASIC**에서는 스캔과 영상 재구성 매개변수를 가진 모든 스캔 프로토콜을 포함하여 Siemens Healthineers CT 스캐너들의 프로토콜 트리를 볼 수 있습니다. 프로토콜이 수정되면 새 버전이 **teamply**에 추가되며 비교를 할 수 있습니다. **Analysis** 뷰는 방사선 값을 추가하여 한 화면에서 필요한 중요 정보를 볼 수 있도록 합니다. CT 프로토콜 탐색기는 제품군에 포함된 Siemens Healthineers 장치의 CT 스캔 프로토콜을 표시함으로써 **MAGNETOM World** 웹사이트로부터 전문 MR 스캔 프로토콜을 확보하고 사용자 제품군에 포함된 Siemens Healthineers에 배포할 수 있도록 합니다.

책임 한계:

- ¹ 병원은 접속된 고객의 장소를 뜻합니다.
 - ² 일부 국가에서는 teamplay 상품을 상업적으로 이용할 수 없습니다. 서비스가 시판되지 않은 국가에서는 서비스 상품을 보증할 수 없습니다. 자세한 사항은 지역 내 Siemens 조직에 문의해주시시오.
 - ³ 전제 조건: 임상 네트워크와의 (무선) 연결, 권장 하드웨어 요건 충족 및 지역 데이터 보안 규정 준수.
 - ⁴ Siemens Healthineers Digital Ecosystem은 현재 개발 중에 있으므로 다른 국가에서 출시되지 않았습니다. 서비스가 시판되지 않을 경우, 서비스 상품을 보증할 수 없습니다.
 - ⁵ teamplay Images Research는 임상용이 아닙니다. DICOM 뷰어는 진단 표시를 위한 것이 아닙니다.
 - ⁶ teamplay Protocols는 일부 Siemens Healthineers 스캐너만 지원합니다. 자세한 내용은 Siemens Healthineers 대리점에 문의해주시시오.
- * 유료 애플리케이션: 벤치마크 옵션은 최소 심사 구독자 수에 따라 이용 가능 여부가 결정됩니다.

.....
Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
전화: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com